

COUSSIN SEMI-FOWLER XS

Références	Désignations
NEG0852	Coussin semi-fowler XS
NEG0875	Housse en coton bouclette
NEG0865	Housse en PU bi-élastique
NEG0852HLEN	Housse en Lenzing®
Dimensions : 50 x 35 cm	



Ce coussin s'adapte à toutes les morphologies. Il maintient et cale le patient en position Semi-Fowler (inclinaison du dossier à 30° et inclinaison du bassin à 30°). Placer le coussin sous les cuisses, le plot d'abduction vers l'avant entre les genoux.

COMPOSITION :

- Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide
- Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène
- Housse coton bouclette : 90% coton, 10% Polyester
- Housse PU bi-élastique : 42% Polyester, 58% Polyuréthane
- Housse lenzing® : 70% lyocell, 30% viscose sur film 100% polyuréthane

RECOMMANDATIONS GENERALES

- Contrôler de façon régulière l'état général de la housse (perforations, abrasion...) et ne plus utiliser le coussin si la housse présente un défaut.
- Afin de ne pas endommager la housse, l'utilisation de solvants ou produits de nettoyage chlorés n'est pas recommandée. Si toutefois l'utilisation de produits chlorés est nécessaire, il est fortement conseillé de diluer le chlore et de rincer plusieurs fois la housse à l'eau.
- La stérilisation de la housse est fortement déconseillée et pourrait endommager le produit.

ENTRETIEN :

Coussins :					
Housse coton bouclette :					
Housse PU bi-élastique :					
Housse lenzing® :					