

COUSSIN DECUBITUS SLIM XS

Références	Désignations
NEG1242	Coussin décubitus slim XS
NEG1337	Housse en coton bouclette
NEG1331	Housse en PU bi-élastique
NEG1242HLEN	Housse en Lenzing®
Dimensions : 230 x 11 cm	



Ce coussin est conçu pour permettre un positionnement ergonomique des membres inférieurs et empêcher qu'ils ne se croisent. Il prévient la bascule latérale.

COMPOSITION :

- Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide
- Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène
- Housse coton bouclette : 90% coton, 10% Polyester
- Housse PU bi-élastique : 42% Polyester, 58% Polyuréthane
- Housse lenzing® : 70% lyocell, 30% viscose sur film 100% polyuréthane

RECOMMANDATIONS GENERALES

- Contrôler de façon régulière l'état général de la housse (perforations, abrasion...) et ne plus utiliser le coussin si la housse présente un défaut.
- Afin de ne pas endommager la housse, l'utilisation de solvants ou produits de nettoyage chlorés n'est pas recommandée. Si toutefois l'utilisation de produits chlorés est nécessaire, il est fortement conseillé de diluer le chlore et de rincer plusieurs fois la housse à l'eau.
- La stérilisation de la housse est fortement déconseillée et pourrait endommager le produit.

ENTRETIEN :

Coussins :



Housse coton bouclette :



Housse PU bi-élastique :



Housse lenzing® :

