

Notice simplifiée

 Indique la mise sous tension du compresseur.

 Clignote et indique le gonflage du matelas.
Dès extinction, le patient peut être installé.

 Déverrouiller le clavier par un appui continu de 4 secondes pour changer de mode.

DYNAMIC

Mode Dynamique



Mode Soins



30 mn

STATIC

Mode Statique



 LED fixe : Alarme faible. Résoudre la cause ou contacter votre service de maintenance

 LED clignotante : Alarme moyenne. Retirer le patient du support, résoudre la cause ou contacter votre service maintenance.

 Permet d'obtenir des informations techniques sur le fonctionnement (voir notice)

 Dégonflage rapide : CPR ouverte (Open)

 Utilisation normale : CPR fermée (Closed)

4 Cellules équipées de décharges talonnières



www.winncare.fr