

cardiolife AED

Défibrillateur automatique externe

AED-2100



Fighting Disease with Electronics

 **NIHON KOHDEN**



Only 3 steps to save a life

Étape 1. Allumez l'AED

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension, le couvercle s'ouvre automatiquement. Des instructions vocales simples vous guident tout au long de la procédure.

Étape 2. Fixez les électrodes

Les électrodes de l'AED sont pré-connectées et il est inutile de distinguer la droite de la gauche. Il suffit de retirer leur support et de les coller sur le thorax du patient.

Étape 3. Appuyez sur le bouton « choc »

Après avoir fixé les électrodes sur le thorax du patient, l'analyse démarre automatiquement. Si l'AED indique qu'une défibrillation est nécessaire, il suffit d'appuyer sur le bouton « choc » clignotant. Tout le monde peut sauver une vie !


Tests automatiques, pour plus de fiabilité

L'AED possède une fonction de contrôle automatique, ainsi que de tests quotidiens et mensuels.



Test du système

Indique si l'appareil est fonctionnel avec des signaux vert et rouge.

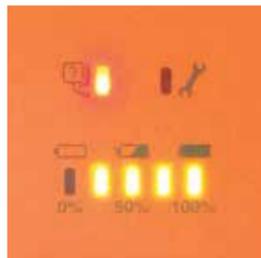

Test de la batterie



Indique la durée de vie restante de la batterie et les points posant des problèmes potentiels.



Test des électrodes

Les connecteurs d'électrodes NIHON KOHDEN possèdent une technologie spéciale* qui contrôle et indique l'état des électrodes.

*brevet en attente

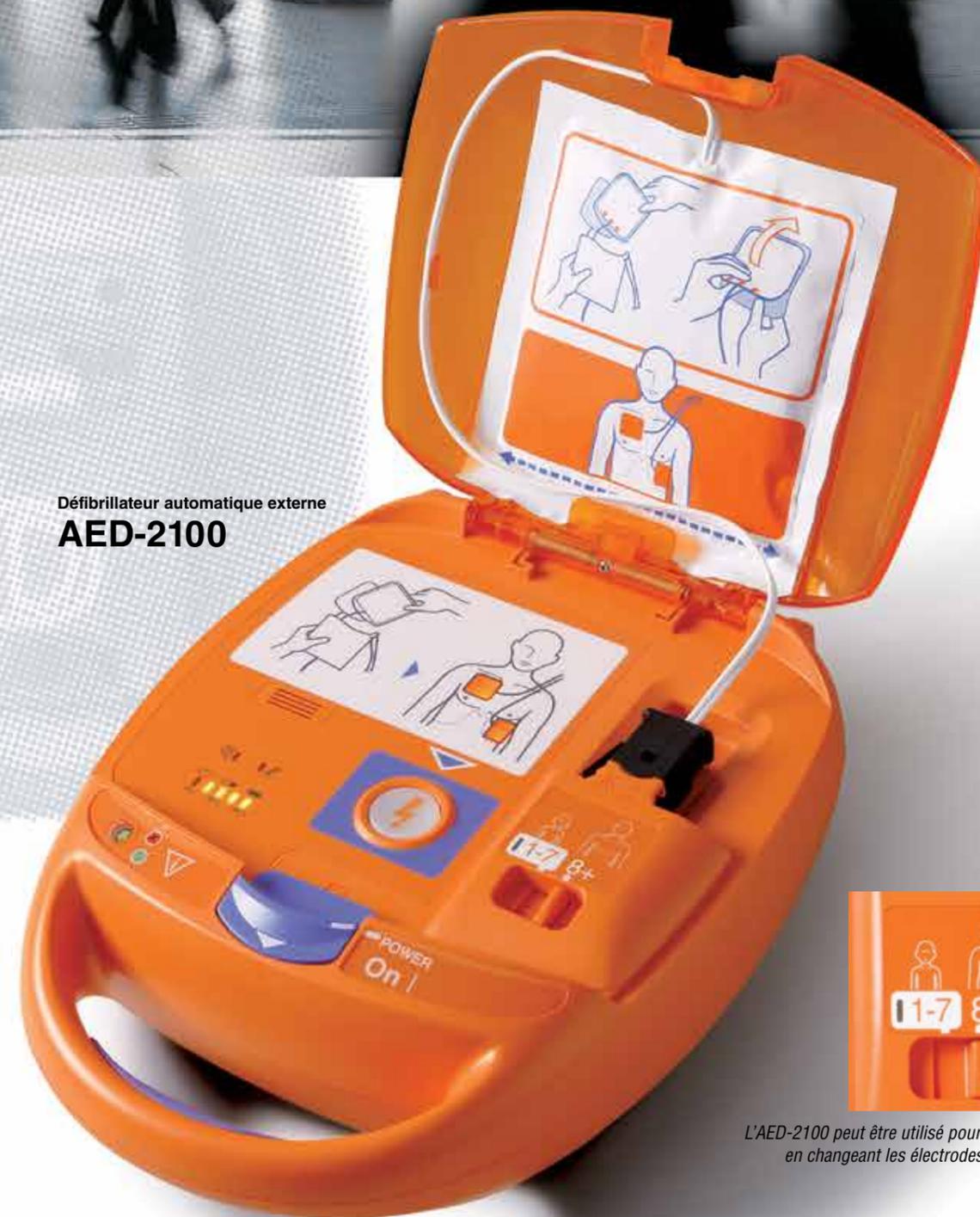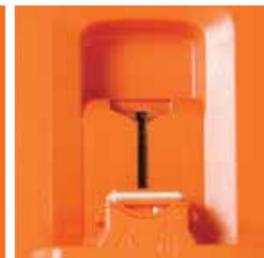

Défibrillateur automatique externe
AED-2100



L'AED-2100 peut être utilisé pour les enfants, en changeant les électrodes et le mode.

Les données enregistrées peuvent être lues sur un PC


L'AED-2100 peut enregistrer 90 minutes de données ECG avec annotation d'événement, que vous pouvez ensuite lire sur un PC, à des fins de diagnostic.



Interface Bluetooth

Les données sauvegardées et les résultats de test automatique peuvent être transférés sur un PC grâce à une connexion *Bluetooth* sans fil.

Le nom et le logo *Bluetooth* sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

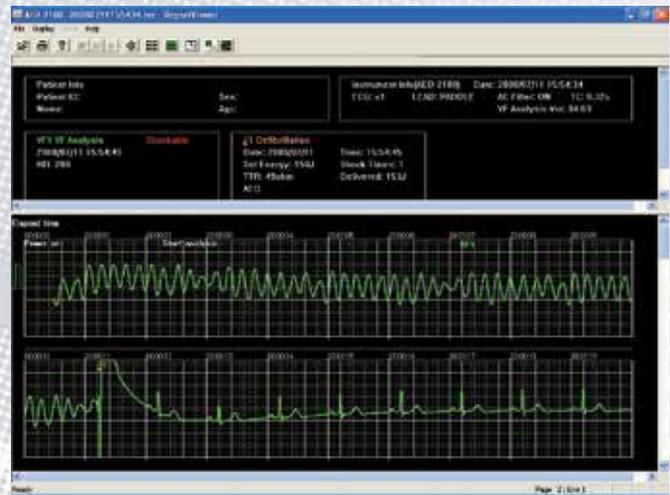

Options

- Boîtier de l'AED (YZ-042H8)



- Kit de montage mural de l'AED (KG-202V)



- Batterie (SB-210K)

- Électrodes de défibrillation :
pour adulte (H324C)
pour enfant (H324E)

- Malette de transport (YC-210V)

- Visionneuse de rapport de l'AED (QP-210VK)

- Unité de formation (TRN-2100)

- Électrodes pour unité de formation :
pour adulte (H326A)
pour enfant (H326B)

- Autocollants de recharge pour électrodes de formation (Y262A)

Save a life with cardiolife AED

NIHON KOHDEN se réserve le droit de modifier ou remplacer cette brochure à tout moment et sans préavis.

NIHON KOHDEN EUROPE GmbH
Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach, Allemagne
Téléphone: +49 (0) 60 03 / 8 27-0, Fax: +49 (0) 60 03 / 8 27-5 99
Internet: www.nihonkohden.net, E-Mail: info@nke.de

NKE-BRC-2100F/A

 **NIHON KOHDEN**

NIHON KOHDEN FRANCE SARL
8, rue François Delage, 94230 Cachan, France
Téléphone: +33 (0) 1 49 08 05 50, Fax: +33 (0) 1 49 08 93 32
Internet: www.nihonkohden.fr, E-Mail: info@nkfrance.fr